



FLÄCHEN-
DESINFIZIERUNGSMITTEL

Amocid®

Wischdesinfektion von **Medizinprodukten**
(und Flächen)

Désinfection par essuyage des surfaces,
des dispositifs médicaux



CE0482

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Amocid®
Konzentrat

Zur gewerblichen Verwendung

ZUSAMMENSETZUNG

100 g **Lösung** enthalten: 15,9 g Biphenyl-2-ol, Natriumhydroxid

ANWENDUNGSGEBIETE

- Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten (und Flächen) in **einem** Arbeitsgang
- Anwendung nach Aufbereitungsanweisung des Medizinprodukteherstellers
- zur Desinfektion von Behältern mit tuberkulösen Ausscheidungen (Auswurf, Stuhl, Harn)
- Wäsche-Desinfektion (inkl. Tbc)

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG

Amocid® ist ein flüssiges Konzentrat, mit dem jede gewünschte Gebrauchsverdünnung durch Zugabe von Wasser (max. Zimmertemperatur) hergestellt werden kann. Immer erst Wasser einfüllen und dann **Amocid®** zugeben.

Flächendesinfektion

Hospitalismus-Prophylaxe in der allgemeinen Praxis (inkl. Tbc)	2,50 % – 1 h
--	--------------

Behälter mit tuberkulösen Ausscheidungen	1,50 % – 4 h
--	--------------

Wischdesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschließlich EN 16615), hohe Belastung

bakterizid, levurozid, tuberkulozid	2,50 % – 1 h
-------------------------------------	--------------

	1,50 % – 4 h
--	--------------

zur Seuchenbekämpfung gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz IfSG

Flächendesinfektion	5,00 % – 6 h
---------------------	--------------

Wäschedesinfektion	1,00 % – 12 h
--------------------	---------------

Desinfektion von Auswurf	5,00 % – 4 h
--------------------------	--------------

Desinfektion von Stuhlausscheidungen	5,00 % – 6 h
--------------------------------------	--------------

Desinfektion von Harnausscheidungen	5,00 % – 2 h
-------------------------------------	--------------

4 Dosier-Pumpenhübe (20 ml je Hub) auf 8 Liter Wasser = 1 %

WARN- UND LAGERHINWEISE

- Desinfektionsmittel kühl, aber frostfrei, gut belüftet, trocken und für Kinder unzugänglich lagern!
- Beim Umgang mit dem unverdünnten Präparat geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

EIGENSCHAFTEN

- bekämpft Bakterien (inkl. Tbc) und Pilze; wirksam auch bei tuberkulösen Ausscheidungen (kein Eiweißfehler)
- materialschonendes Flächen- und Wäsche-Desinfektionsmittel
- großes Netzvermögen, reinigungsaktiv auch ohne Zusatz von Reinigungsmitteln
- bildet stabile Lösungen

Mode d'emploi

à lire attentivement!

Amocid®
concentré

Pour usage professionnel

PRINCIPES ACTIFS

100 g **de solution** contiennent: 15,9 g biphenyl-2-ol, sodium hydroxide

CHAMPS D'APPLICATION

- désinfection et nettoyage des dispositifs médicaux (et des surfaces) en une **seule** étape
- utilisation conformément aux instructions de préparation du fabricant des dispositifs médicaux.
- désinfection des excréments tuberculeux (crachats, selles, urine)
- désinfection du linge (tb inclus)

MODE D'UTILISATION/DOSAGE

Amocid® est un concentré liquide avec lequel il est possible de préparer toute concentration souhaitée, simplement en lui ajoutant de l'eau (température max.: ambiante). Toujours remplir le récipient d'eau d'abord et ajouter le concentré ensuite.

Désinfection des surfaces

prévention des infections nosocomiales désinfection routinière (tb inclus)	2,50 % – 1 h
---	--------------

récipients avec excréments tuberculeux	1,50 % – 4 h
--	--------------

Désinfection des surfaces par essuyage conformément aux méthodes de la VAH de 2015 (ainsi que de la EN 16615)

bactéricide, levuricide, tuberculicide	2,50 % – 1 h
--	--------------

	1,50 % – 4 h
--	--------------

Contrôle des épidémies conformément au §18 de la loi sur la protection contre les infections (IfSG)

désinfection du surface	5,00 % – 6 h
-------------------------	--------------

désinfection du linge	1,00 % – 12 h
-----------------------	---------------

crachats	5,00 % – 4 h
----------	--------------

selles	5,00 % – 6 h
--------	--------------

urine	5,00 % – 2 h
-------	--------------

4 pressions sur piston-doseur (1 pression = 20 ml) pour 8 l d'eau = 1 %

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI/STOCKAGE

- Conserver les désinfectants dans un endroit frais, mais à l'abri du gel, bien ventilé et hors de la portée des enfants!
- Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés lors de la manipulation du produit non-dilué.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.

PROPRIÉTÉS

- action bactéricide (tb inclus), fongicide, même lors de la désinfection des excréments tuberculeux (pas d'incompatibilité avec l'albumine)
- non-agressif vis-à-vis des surfaces et du linge
- excellent pouvoir mouillant, action détergente sans adjonction de détersifs
- forme des solutions stables

BESONDERE HINWEISE

- a) Inkompatibilitäten
Durch Beimischung üblicher Reinigungsmittel kann die desinfizierende Wirkung von **Amocid®** eingeschränkt bzw. aufgehoben werden.
- b) Gegenmaßnahmen bei unsachgemäßem Gebrauch
Sollte das Präparat **Amocid®** durch unsachgemäßen Gebrauch in Kontakt mit Schleimhäuten (Augen, Rachen, Magen etc.) gekommen sein, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden. Als Sofortmaßnahme wird die Verdünnung des Präparates empfohlen: bei oraler Einnahme reichlich Wasser trinken, bei Kontakt mit den Augen reichlich mit Wasser spülen.
- c) Sonstiges
Amocid® ist für die Desinfektion von Acryl-Glas nicht geeignet.
- d) **Amocid®** sicher verwenden!
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

	Art.-Nr.
12 x 1-Liter-Flasche	1476
2 x 5-Liter-Kanister	1505

Zubehör

Dosierpumpe für 5 Liter-Kanister (1 Hub = 20 ml)	3135
---	------

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

- a) Incompatibilités
Tout mélange est à proscrire: les détergents risquent de réduire ou d'éliminer le pouvoir désinfectant de l'**Amocid®**.
- b) Contre-mesures en cas d'utilisation incorrecte:
Au cas où l'**Amocid®** viendrait en contact avec les muqueuses (yeux, gorge, estomac, intestins etc.), consulter un médecin immédiatement. Premiers soins: diluer le produit en faisant boire au patient une quantité d'eau importante. En cas de projections dans les yeux, les rincer abondamment à l'eau.
- c) en outre
ne pas appliquer ce produit sur du plexiglas
- d) Utilisez **Amocid®** en toute sécurité. Lisez l'étiquette et le mode d'emploi avant l'utilisation.

CONDITIONNEMENT/UNITÉS D'EMBALLAGE

	no d'article
12 x 1000 ml vaporisateur avec flacon	1476
2 x 5 litres (bidons)	1505

Accessoires

Piston-doseur pour jerrican de 5 litres (1 pression = 20 ml)	3135
---	------

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappellerion aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

LYSOFORM

Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG

Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14
www.lysoform.ch