



INSTRUMENTEN-
DESINFektionsmittel

Blanisol®-SB-clean-CH

Säurehaltiger Reiniger mit Klarspüler für thermische
Steckbeckenspüler

Nettoyant acide avec agent de rinçage
pour laveuses de bassins thermiques



CE

Produktinformation

Bitte sorgfältig lesen!

Blanisol®-SB-clean-CH

- ist ein saurer Steckbeckenreiniger für Steckbeckenspülgeräte mit automatischen Dosiereinrichtungen.
- reinigt intensiv und löst Salbenreste.
- verhindert das Absetzen von Kalk im Steckbeckenspülgerät und auf dem Geschirr.
- bei allen Wasserhärten einsetzbar.

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Blanisol®-SB-clean-CH enthalten:
< 5 % nichtionische Tenside, Zitronensäure

ART DER ANWENDUNG/DOSIERUNGSANLEITUNG:

- 1,5 ml – 15 ml Blanisol®-SB-clean-CH auf 1 l Wasser
• automatische Dosierung mit maschineneigener Dosierpumpe

UMWELTASPEKTE:

- erfüllt die Auflagen der EU-Detergenzienverordnung 648/2004/EG und des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG).
- ist frei von Phosphaten und Phosphonaten.

GEFAHRENHINWEISE / SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

Verursacht schwere Augenreizung. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen. Medizinprodukt kühl, aber frostfrei, gut belüftet und trocken sowie für Kinder unzugänglich lagern.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

| | Art.-Nr. |
|-----------------------|----------|
| 2 x 5 Liter-Kanister | 2150 |
| 1 x 10 Liter-Kanister | 2152 |

Mode d'emploi

à lire attentivement!

Blanisol®-SB-clean-CH

- est un nettoyant acide pour lave-bassines avec équipement de dosage automatique
- est un nettoyant acide pour lave-bassines
- avec doseurs automatiques
- nettoie intensément et dissout les résidus de pommade
- empêche le tartre dans la laveuse et sur les plats
- peut être utilisé avec toutes les duretés de l'eau

COMPOSITION

100 g de Blanisol® SB clean-CH contiennent:
< 5 % de tensioactifs non ioniques, d'acide citrique

MODE D'APPLICATION/DOSAGE

- 1,5 ml – 15 ml de Blanisol®-SB-clean-CH pour 1 l d'eau
• dosage automatique avec la pompe de dosage de la machine

APECTS ENVIRONNEMENTAUX

- Conforme aux exigences du règlement de la communauté Européenne sur les détergents 648/2004 / CE et de la loi sur les lessives et les détergents
- Ne contient ni phosphates, ni phosphonates.

AVIS DE DANGER / CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Provoque une irritation grave des yeux. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Conserver au sec et au frais, mais à l'abri du gel, dans un endroit bien ventilé, et hors de la portée des enfants.

CONDITIONNEMENT / UNITÉS DE TRANSPORT

| | art. no. |
|-------------------|----------|
| 2 x 5 l (bidons) | 2150 |
| 2 x 10 l (bidons) | 2152 |

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!
Wir rufen sofort zurück.

Vous avez des questions? Contactez-nous au numéro suivant –
Nous vous rappelleront aussitôt!

D: 030 - 77 99 2-0
CH: 056 - 441 69 81

 **Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, 12247 Berlin
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de
LYSOFORM
Schweizerische Gesellschaft für Antisepsie AG
Postfach 444, 5201 Brugg/Windisch
Telefon 056 - 441 69 81, Telefax 056 - 442 41 14
www.lysoform.ch