

GERÄTE/ZUBEHÖR

Lydos 1000-Wandspender für 1000 ml Flaschen

Spender mit langem Bedienhebel für Händedesinfektionsmittel und Flüssigseifen



Montage- und Bedienungsanleitung

Vor Spendermontage beachten:


1. Spender über dem Waschtisch oder in unmittelbarer Nähe anbringen, damit nasse Hände abtropfen können.
2. Benötigter Platz oberhalb des Spenders: 40 mm. Benötigter Platz unterhalb des Spenders ca. 150 mm (siehe Maßskizze).
3. Günstige Montagehöhe: 130-135 cm, gemessen vom Fußboden oder bis Oberkante des Spenders.

Pflege:


Der Spender selbst ist wartungsfrei! Reinigung nur mit warmem Seifenwasser und keine ätzenden (chlorhaltigen) Reiniger oder Scheuermittel verwenden! Nichtbenutzung, z. B. während des Urlaubs, führen zu keiner Beeinträchtigung, wenn der Behälter gefüllt ist: Rechtzeitig leeren Behälter austauschen.

Sollte trotzdem das Saugventil durch Leerstehen verklebt sein, bitte nur heißes Wasser durchpumpen, und die Funktion ist wieder hergestellt.

Keinesfalls das Gerät zerlegen! Bitte nur Originalersatzteile verwenden.

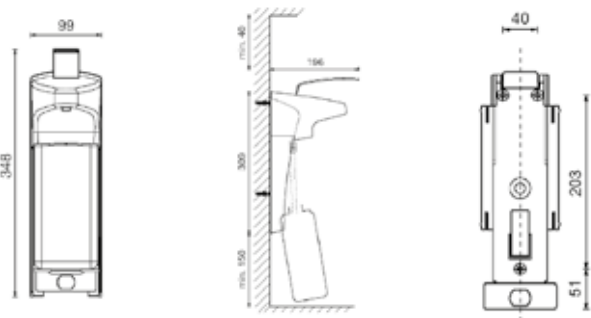

①

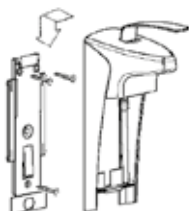

Spendermontage

Behälter aus dem Spender nehmen. Verriegelungszunge andrücken und Wandhalter nach unten vom Gehäuse abziehen. Mit beiliegenden Dübeln und Schrauben Wandhalter befestigen. Spender aufschieben, bis Verriegelungszunge einrastet.

②



Behältertausch

Gefüllten Behälter von unten in den Spender einsetzen. Beiliegenden Clip zur Kennzeichnung eindrücken.

③



Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme muß der Hebel einige Male bis zum Anschlag niedergedrückt werden, bis der Spender dosiert. Dabei die Hand unter den Auslauf halten.

④



Reinigung

Verriegelungszunge drücken und Spender nach oben herauschieben. Reinigung nur mit warmem Seifenwasser und keine ätzenden (chlorhaltigen) Reiniger oder Scheuermittel verwenden!


⑤



Dosierung

Werksmäßig wird der Spender auf die maximale Dosierleistung von ca. 1,8 ml/Hub eingestellt. Bei Bedarf läßt sich die Dosierung stufenweise durch Drehen der Dosiergabel nach rechts und links bis auf ca. 0,8 ml/Hub reduzieren.

⑥

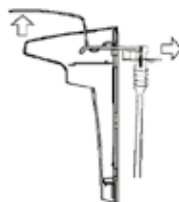

Austausch der Pumpe

Bedienungshebel in oberer Position festhalten und Pumpe waagrecht nach hinten herausziehen. Zum Einsetzen der Pumpe den Bedienungshebel in oberer Position festhalten und Pumpe in den Spender schieben.

VERSANDEINHEIT/PACKUNG

Lydos 1000 ml-Wandspender

Art.Nr. 5763

Haben Sie spezielle Fragen? Rufen Sie uns an!

Wir rufen sofort zurück.

Tel.: 030 - 77 99 2-0



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str. 133, D-12247 Berlin
Telefon 030 - 77 99 2-0, Telefax 030 - 77 99 2-269
www.lysoform.de, e-mail: kontakt@lysoform.de

2022/02/28_3